

leichte
einfache
Bedienung,
große
Sicherheit



Der Haltegürtel ist Teil eines Produktprogramms mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Insbesondere beim Aufrichten bzw. Transfer von Pflegebedürftigen in der häuslichen Pflege, anderen medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie in Krankenhäusern kommt dieses Produkt zum Einsatz.

Er ist eine sichere Transferhilfe, die für den Pflegebedürftigen angenehme und komfortable sowie für den Anwender rückschonende und einfach Transfers ermöglicht. Der Haltegürtel wird

dem Patienten und/oder der Pflegekraft um die Taille gelegt und mit Hilfe einer Schnalle verschlossen. Die Antirutschschiene im Innenbereich sowie die vertikalen und horizontalen Griffe erleichtern die Handhabung, die Pflegekraft kann den Bewegungsablauf steuern und unsichere Patienten stützen, ohne dass diese am Arm gegriffen werden müssen.



Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Haltegürtel	Polyamid, latexfrei	rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-6012	75 x 12	400 g	(01)04250355360120(10)LOT
PM-6013	101 x 12	450 g	(01)04250355360137(10)LOT
PM-6014	117 x 12	520 g	(01)04250355360144(10)LOT
PM-6015	148 x 12	600 g	(01)04250355360151(10)LOT
PM-6016	185 x 12	650 g	(01)04250355360168(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt erfordert keine besondere Pflege. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Wir empfehlen das Waschen mit Feinwaschmitteln. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit bleichenden Inhaltsstoffen oder anderen chemischen Waschzusätzen, sowie Weichspüler, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produkteigenschaften führen.

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten.



Made in EU